



KN95 Atemschutzmaske, 4-lagig

Produktbilder





Beschreibung

KN95-Mundmaske für Erwachsene mit Nasenklammer. Im Vergleich zu anderen Atemschutzmasken filtert die KN95-Partikelmaske bis zu 95% der Partikel in der Luft, die größer sind als 0,3 Mikrometer.

Diese Staubmaske schützt Sie bei der Arbeit, beim Einkaufen oder an anderen öffentlichen Plätzen. Ideal für unterwegs. Die Schutzmaske ist eine 4-lagige Maske mit Ohrschlaufen, die für viele Elemente und Partikel einen Schutz bieten kann.

Bitte beachten Sie: Das Tragen einer Maske schützt Sie und Ihre Mitmenschen, allerdings kann eine Infektion nicht ausgeschlossen werden!

Eigenschaften

Zertifizierung: entspricht KN95 - nicht ölbeständig

Mundschutz mit Gummiband - 4-lagig

Polypropylen-Vlies

Wichtige Informationen zur Nutzung und Anlegen einer KN95 Atemschutzmaske:

- Vorbereitung: Hände gründlich waschen, Brille oder Schutzbrille absetzen
- Maske nur von Außen berühren und nur an den Gummibändern anfassen, vor das Gesicht halten und beide Gummibänder hinter die Ohren ziehen
- Nasenbügel der Maske auf die Nase drücken, Bügel eng einstellen, damit die Maske gut an Nase und Wangen anliegt
- Maske mit Daumen und Zeigefinger nach unten über das Kinn ziehen
- danach Brille oder Schutzbrille aufsetzen
- während des Tragens die Maske nicht mit den Händen berühren oder zwischendurch unter das Kinn ziehen und später wieder vor das Gesicht bringen ansonsten muß eine neue Maske angezogen werden
- beim Entfernen der Maske diese nur über die beiden Gummibänder gleichzeitig nach vorne ziehen
- beim Abnehmen der Maske kurz den Atem anhalten, da sich auf der Oberfläche Viren, Staub, Polen oder andere Partikel befinden können
- Hände erneut gründlich waschen

Mehr Informationen

Lieferzeit

2-3 Tage

